

# hematrix


## Hematrix®

Hemostatická náplasť  
Na okamžité použitie


Vyrobené v Nemecku  
37318/3014




Výrobca  
Hematrix Wound Care GmbH  
Prof.-Messerschmitt-Str. 3  
85579 Neubiberg  
Nemecko  
www.hematrix.de

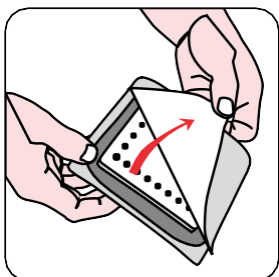

Otvorte iba na  
označenom okraji

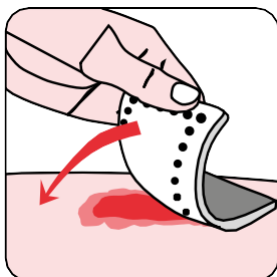

Priložte aktívnu stranu  
označenú modrou na ranu

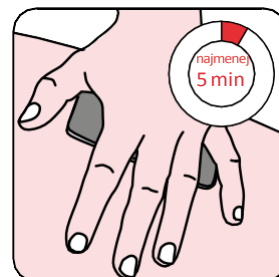

Pritlačte na ranu po dobu  
najmenej 5 minút

### POPIS A VEĽKOSŤ BALENIA

Hematrix® je sterilná náplasť na ranu, ktorá sa skladá z polyuretánovej peny obsahujúcej aktívne zložky pre hemostázu. Hematrix® je dostupný v nasledujúcich rozmeroch a veľkostiach balení:

Rozmery	Obsah
5 x 5 cm	1kus/blister

### ZLOŽENIE

Polyuretánová pena, kyselina epsilón-aminokaprónová (EACA), Chlorid vápenatý, trombín hovädzieho pôvodu, patentná modrá (E131)

Trombín má kontrolovaný pôvod a spĺňa podmienky Európskeho liekopisu.

### ÚČEL URČENIA

Výrobok Hematrix® je indikovaný na použitie ako vonkajšia náplasť na ranu. Hematrix® zastavuje závažné a tiež arteriálne krvácanie.

### KONTRAINDIKÁCIE

Precitlivenosť na ktorúkoľvek zo zložiek ako napr. kravský proteín.  
Použitie náplasti Hematrix® nebolo testované na tehotných ženách. Pokiaľ nie je indikácia jednoznačná, je potrebné zvážiť použitie oproti iným hemostatickým opatreniam.

### DÁVKOVANIE A DĹŽKA POUŽITIA

Aktívna strana náplasti Hematrix®, ktorá sa dá

rozpoznať podľa modrého označenia, je pritlačená vhodným tlakom na miesto krvácania na minimálne 5 minút. Pokiaľ sa nedosiahla dostačujúca hemostáza, je potrebné priložiť na ranu novú náplasť Hematrix® na ďalších 5 minút. Predčasné odstránenie náplasti môže zhoršiť proces hemostázy. Ojedinele je potrebné použiť aj konvenčný tlakový obväz. Hematrix® náplasť sa musí použiť celá a nepoškodená. Nesmie sa natrihať na kúsky a následne použiť.

### UPOZORNENIE

Je dôležité, aby sa náplasť Hematrix® neodstránila pred zabezpečením ďalšieho ošetrovania rany. Počas prvej pomoci pri ťažkých krvácaní je dôležité sledovať ostatné poranenia a vitálne funkcie. Hematrix® nepoužívajte opakovane. Hematrix® neponechávajte na rane a odstráňte ho po jeho použití.

### NEŽIADUCE ÚČINKY

Vyskytnúť sa môže slabá iritácia pokožky a svrbenie. V klinických štúdiách boli pozorované slabé alergické reakcie u približne 1% pacientov.

### INTERAKCIE

Nie sú známe žiadne interakcie.

### USKLADNENIE



25°C/ 77° F

Horná hranica teploty



Chráňte pred slnečným svetlom.

Uchovávajte v suchu.

Nepoužitú náplasť alebo odpad likvidujte podľa lokálnych požiadaviek.

Uchovávajte mimo dosahu detí.



Použite do (RRRR-MM).

Dátum expirácie je vyznačený na obale.

Po uplynutí doby expirácie produkt nepoužívajte.

### SYMBOLY



Sterilné, metóda sterilizácie (ionizujúce žiarenie).



Nepoužívajte opakovane.



Opakovane nesterilizujete.



Nepoužívajte ak je obal poškodený.



Pozor, preštudujte si priložený návod na použitie.



Dodržujte návod na použitie.



Číslo šarže vyznačené na obale.

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU  
Marec 2015